

Sport & Therapie-Balancierbalken

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem

Sport & Therapie-Balancierbalken.



Betriebs- und Sicherheitsanleitung:

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung und Garantie.

Aufstellen des Balancierbalkens:

Vor Betreten des Sport & Therapie-Balancierbalkens muss er auf Betriebssicherheit und Standfestigkeit von einer erwachsenen, mündigen Person überprüft werden.

- Der Sport & Therapie-Balancierbalken muss waagrecht aufgestellt werden.
- Die Gummibänder außen müssen fest am Boden aufliegen.
- Der Untergrund muss der Belastung standhalten.
- Bei leichten Bodenunebenheiten kann der Sport & Therapie-Balancierbalken so lange verschoben werden, bis die Gummibänder fest auf dem Boden aufliegen.
- Der Sicherheitsbereich beträgt 1 m auf allen vier Seiten. Der Sicherheitsbereich muss frei von anderen Gegenständen sein.
- Bei schwierigen Übungen und ab der Balancierbreite von 20 mm müssen Sicherheits-Sturzmatten links und rechts des Sport & Therapie-Balancierbalken verwendet werden.

Der Sport & Therapie-Balancierbalken darf nicht betreten werden:

- Wenn die Gummibänder nicht fest auf dem Boden aufliegen
- Wenn ein Gummiband beschädigt ist, oder nicht exakt in der Führungsnut liegt
- Auf unebenem und rauem Untergrund
- Auf nassem Untergrund
- Auf instabilen Unterlagen
- Auf erhöhten Unterlagen
- Bei Schäden am Balancierbalken
- Wenn der Sicherheitsbereich zu klein ist

Sicherheit:

- Beim Aufstellen oder Wenden die Finger nicht unter dem Sport & Therapie-Balancierbalken halten.
- Der Sport & Therapie-Balancierbalken darf nur mit rutschfesten Socken oder Sportschuhen betreten werden.
- Laufen über den Sport & Therapie-Balancierbalken ist VERBOTEN!
- Seitliches Aufspringen auf den Sport & Therapie-Balancierbalken ist VERBOTEN! (Kippgefahr)
- Die zwei Gummibänder müssen bei Beschädigung erneuert werden.

Der Sport & Therapie-Balancierbalken ist ein hochwertiges Massivholzprodukt und unterliegt daher bestimmten Voraussetzungen.

Reinigung:

- Die Gummibänder müssen vom Staub mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden!

Aufbewahrung:

- Der Sport & Therapie-Balancierbalken muss in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Mariapfarr, Oktober 2018

Hersteller:

Firma
Josef Kößlbacher
Zankwarn 20
5571 Mariapfarr
Austria

Tel.: +43(0)6473/8456
E-Mail: koesslbacher-josef@sbg.at
www.balancierbalken.at